

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SpineMED GREECE®

Η **spineMED GREECE®** είναι μια εισαγωγική εταιρεία που ασχολείται με μηχανήματα αποκατάστασης και αποθεραπείας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της spineMED Αμερικής στην Ελλάδα, έχει ως στόχο τη συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της. Σε στενή συνεργασία με επιστήμονες στο χώρο της αποκατάστασης, η **spineMED GREECE®**, φέρνει στη χώρα μας πρωτοποριακές μεθόδους οι οποίες είναι διαδεδομένες στην Αμερική και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 2007 η **spineMED GREECE®**, προχώρησε στην απόκτηση της νέας τεχνολογίας διαλείπουσας οσφυϊκής και αυχενικής αποσυμπίεσης spinemed.

Η θεραπεία με τη μονάδα αποσυμπίεσης (κρεβάτι) spinemed είναι:

- Ασφαλής και ανώδυνη
- Έχει προκαθορισμένη περίοδο αποκατάστασης
- Είναι μη χειρουργική μέθοδος και χωρίς τη χρήση φαρμάκων

Η θεραπεία με τη μονάδα αποσυμπίεσης (κρεβάτι) spinemed εφαρμόζεται σε:

- Κήλη δίσκου

- Εκφυλισμένο δίσκο
- Ισχιαλγία
- Ριζίτιδα
- Σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (facet syndrome)
- Προεγχειρητικούς και μετεγχειρητικούς ασθενείς

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή ντυμένο. Για το πρώτο

SpineMED
Greece

κόλλο της οσφυϊκής αποσυμπίεσης, ο ασθενής τοποθετείται πάνω στο κρεβάτι και οι σταθεροποιητές προσαρμόζονται ώστε να ακινητοποιηθεί η λεκάνη του ασθενούς. Ο άνω κορμός σταθεροποιείται με μια ζώνη Velcro η οποία βρίσκεται στο σταθερό σημείο του κρεβατιού. Η λεκάνη του ασθενούς τοποθετείται πάνω από το τμήμα του κρεβατιού το οποίο ανασπώνεται ανάλογα με το επίπεδο της σπονδυλικής στήλης το οποίο πάσχει. Με μεγάλη ακρίβεια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη έλξη, το συγκεκριμέ-

νο επίπεδο της σπονδυλικής στήλης, αποσυμπιέζεται.

Για τη διαδικασία της αυχενικής αποσυμπίεσης, η μονάδα πρώτα ανασπάζεται ανάλογα με το επίπεδο της αυχενικής μοίρας το οποίο θα αποσυμπιεστεί. Στη συνέχεια ο ασθενής τοποθετείται στο κρεβάτι. Οι σταθεροποιητές τοποθετούνται στη βάση του κρανίου του ασθενούς και μια ζώνη Velcro πάνω από το μέτωπο συγκρατεί το κεφάλι πάνω στη μονάδα. Η έλξη πάλι πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να επιτευχθεί η αποσυμπίεση.

Μια τυπική διαδικασία με τη μονάδα spinemed αποτελείται από 30 λεπτά αποσυμπίεσης. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και ασφαλής και πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ο ασθενής κοιμάται.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η SPINEMED GREECE
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ./FAX: 210 6518437 www.spinemed.gr, info@spinemed.gr